

Link do produktu: <https://rehaiq.pl/fotelik-samochodowy-baffin-1-p-7.html>

Fotelik samochodowy Baffin .1

Cena

7 200,00 zł



Opis produktu



Fotelik samochodowy dla dzieci **Baffin.1** został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci o osłabionym napięciu mięśniowym. **Baffin.1** został przetestowany przez laboratorium TÜV SÜD i jest homologowany jako „urządzenie przytrzymujące dla osób niepełnosprawnych”. Potwierdzeniem tego jest literka „S” oraz napis „special needs restraint” na naszej pomarańczowej tabliczce homologacyjnej.

Wyrób uzyskał homologację zgodnie z regulaminem nr 44 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym.

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania, przed złożeniem zamówienia skontaktuj się z nami sklep@rehaiq.pl

Poznaj fotelik samochodowy Baffin .1

Cechy szczególne fotelika Baffin.1 dla dziecka z osłabionym napięciem mięśniowym.

Fotelik samochodowy Baffin .1 przeznaczony jest dla dzieci o wadze 9-36 kg. Fotelik posiada możliwość regulacji w trzech płaszczyznach. Można dostosować szerokość i wysokość oparcia pleców oraz głębokość siedziska. Baffin.1 jest zaprojektowany i zatwierdzony do użytku w następujących „grupach wagowych”:

- Grupa I dla dzieci o



-
- wadze od 9 do 18 kg,
 - Grupa II dla dzieci o wadze od 15 do 25 kg,
 - III grupa dla dzieci o wadze od 22 do 36 kg.

2. Stabilizacja dla osób niepełnosprawnych.

Zestaw dodatkowych poduszek oraz pasów zapewnia doskonałe pozycjonowanie dla dzieci z osłabionym napięciem mięśniowym.

3. Ułatwione wsadzanie dziecka do fotelika.

Łatwy dostęp do fotelika podczas wsadzania pasażera możliwy jest dzięki obrotowej platformie. Pomocne zwłaszcza dla dzieci o masie ciała powyżej 18 kg.

Specyfikacja techniczna fotelika samochodowego Baffin .1

Głębokość siedziska	29 ÷ 37 cm
Szerokość siedziska	20 ÷ 32 cm
Wysokość oparcia wraz z zagłówkiem	58 ÷ 77 cm
Szerokość pelot bocznych	14 ÷ 23 cm
Kąt regulacji platformy stóp	0° ÷ 20°
Maksymalna waga pacjenta	36 kg

Ważne informacje dotyczące montowania fotelika i zapinania dziecka

1. W grupie wagowej I (9-18 kg) fotelik montowany jest za pomocą trzypunktowych pasów bezpieczeństwa samochodowych + dziecko przypinane jest w foteliku za pomocą 5-punktowych pasów wewnętrznych fotelika. Punkty 1 oraz 2 Instrukcji Obsługi.
2. W grupie wagowej II (15-25 kg) oraz III (22-36 kg) mocowanie fotelika i zapinanie dziecka odbywa się za pomocą trzypunktowych pasów bezpieczeństwa samochodowych. W przypadku dzieci o masie ciała powyżej 18 kg., pasy 5-punktowe należy zdjąć. Punkt 3 i 4 Instrukcji Obsługi.
3. Dla dzieci o masie ciała od 15 kg do 18 kg ZAWSZE używaj pasów 5-punktowych opisanych w punkcie 2 Instrukcji Obsługi.

Czym Baffin.1 różni się od zwykłych fotelików sprzedawanych w sklepach z artykułami dla dzieci?

Akcesoriami, systemami podtrzymującymi dla osób niepełnosprawnych, platformą obrotową przetestowaną oraz homologowaną do użytku dla osób niepełnosprawnych.

Co to znaczy?

Fotelik samochodowy dla dzieci Baffin.1 RAZEM z akcesoriami REHA poddany został testom zderzeniowym. Dzięki temu wiemy, że w czasie wypadku wszystkie elementy fotelika, w tym również te przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych są bezpieczne dla użytkownika w czasie wypadku, a sam fotelik spełnia rygorystyczne przepisy.

WYJĄTEK: stolik używamy tylko w czasie postoj. Stolik nie był testowany w testach zderzeniowych i nie jest przeznaczony do użytku w czasie gdy samochód porusza się.

Akcesoria

1. **Obrotowa platforma** ułatwiająca wsiadanie dzieci do fotelika. Pomocne zwłaszcza dla dzieci o masie ciała powyżej 18 kg.
2. **Podnóżek** na stopy z regulacją wysokości oraz kąta nachylenia.
3. **Systemy dodatkowej stabilizacji:**
 1. dodatkowa poduszka na oparcie – poduszka z bocznym podparciem umożliwiającą stabilne boczne podparcie dla dzieci bardzo szczupłych,
 2. dodatkowa poduszka siedziska – umożliwia zmniejszenie szerokości siedziska,
 3. dodatkowa tapicerka zagłówka - stosowana gdy głowa dziecka wymaga dodatkowego bocznego podparcia,
 4. pas piersiowy – służy do dodatkowego pozycjonowania i podtrzymywania klatki piersiowej (tułowia),
 5. pasy odwodzące nogi – 2 szt. – służą do stabilizacji i odwodzenia kończyn dolnych.
4. **Stolik** – akcesorium do stosowania tylko na postoju. Zabrania się korzystania ze stolika w czasie poruszania się samochodu. Stolik nie był bowiem poddawany testom zderzeniowym.

Wyposażenie standardowe fotelika samochodowego Baffin .1

- Zagłówek
- Pasy pięciopunktowe
- Peloty piersiowe stabilizujące tułów wraz z pasem piersiowym
- Dodatkowa wkładka siedziska dostosowująca szerokość siedziska oraz utrzymująca prawidłową pozycję siedzącą
- Pasy odwodzące uda
- Stolik
- Platforma obrotowa

Producent: LIW Care Technology Sp. z o. o.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarno-szary , Jasnoszary